

## MedQuick

メドクイック

来院不要  
一人で簡単

判定まで  
15分

変異株対応

陽性の場合  
無償でPCR検査が  
受けられる

### MedQuickとは

”誰でも・いつでも・どこでも”必要な時に抗原検査が可能なオンライン抗原検査です



国内承認の信頼性の高い  
抗原検査キットを採用しています。



15分で陰性・陽性の結果  
がわかります。



オンライン診察の受診  
が可能です。

### 陽性時には安心のアフターフォロー付き

陽性の場合は速やかに医師とのオンライン診察を受診していただき、医療機関から保健所に対して届出を提出いたします。

### 検査方法は簡単

#### 鼻から検体を採取

綿棒の先端が鼻孔入口部から2cm程度奥まで届くようにし、両方の鼻腔粘液と細胞がきちんと採取できるよう、粘膜に沿って数秒間回転させます。



#### チューブに検体を入れる



検体を採取した綿棒をチューブの内側に押し当てて5回ほど回し、液体をそぎ落とします。最後にキャップをしっかりとチューブに差し込みます。



15分後

#### 試験カセットに検体を入れる

テストキットを清潔で平らな場所に設置します。チューブを優しく絞り、中の検体をサンプルの中に2~3滴注入します。

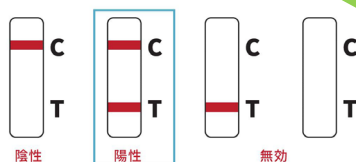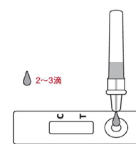

#### 結果判定

左記のように判定が出ます。陽性の場合、医師のオンライン診察を受け、無症状のため保健所へ連携できない場合は、無償でPCR検査を提供します。

### MedQuick内容物

- ・抗原検査キット一式
- ・医師によるオンライン診察・指導・相談
- ・陽性時に保健所連携などのアフターフォロー
- ・陽性時にPCR検査を無償提供

### 販売価格

送料無料

1件 4,900円(税込)

サービス提供元：株式会社MEDICAL SANDBOX

MedQuickで提供されている抗原検査キットは 国内で承認されている検査キット※です。  
検査キットの陽性率(感度)は90.85%、陰性率(特異度)は96.29%と、PCR検査に近い検査精度となっています。  
※厚生労働省より体外診断用医薬品として製造販売承認を取得した信頼性の高い検査パレットを使用しています

お問い合わせはこちら

株式会社エイチ・アイ・エス 法人営業本部 教育旅行

☎050-1748-7061